


# WERKINSTRUCTIE

Voor op maat gemaakte inlegzolen met JALAS® Orthocover 8013

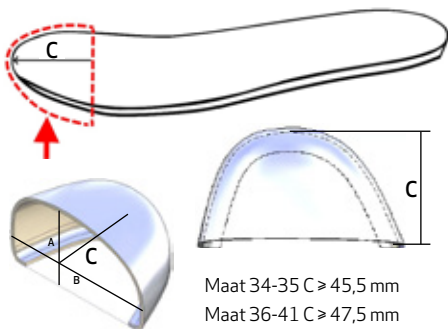

Maat 34-35 C ≥ 45,5 mm  
 Maat 36-41 C ≥ 47,5 mm  
 Maat 42-43 C ≥ 50 mm  
 Maat 44-45 C ≥ 49,5 mm  
 Maat 46-50 C ≥ 52 mm



In het gebied van de schoenness mag er geen opgehoogd materiaal worden gebruikt.



Deze werkinstructie bevat alle relevante informatie voor orthopedische schoenmakers om een individueel aangepaste inlegzool te maken die past in JALAS®-gecertificeerde schoenen, en die voldoet aan normen EN ISO 20345:2011 en EN ISO 20347:2012 volgens de vereisten in EU-verordening 2016/425.

## STAP 1:

Neem de JALAS®-inlegzolen uit het schoeisel. De originele inlegzool kan worden gebruikt als referentie voor de lengte en breedte bij het vervaardigen van de nieuwe, op maat gemaakte inlegzool.

## STAP 2:

Ontwerp en construeer de inlegzolen op basis van de behoeften van de klant.

Let bij het vervaardigen van de nieuwe, op maat gemaakte inlegzool op dat het JALAS®-materiaal de gehele lengte van de inlegzool in de schoen bestrijkt. Hou rekening met de volgende maatvoering:

- hielhoogte minimaal 5 mm en maximaal volgens de wensen van de patiënt. Zorg bij het gebruik van hard materiaal voor een glad afgewerkte constructie die het complete hielgebied bedekt
- de hoogte van de op maat gemaakte inlegzool in zone C mag niet meer dan 2,5 mm zijn. Dit betekent dat er in het gebied van de schoenness geen opgehoogd materiaal mag worden gebruikt.

## STAP 3:

Verwijder stof en vuil van de op maat gemaakte inlegzool.

Hecht de JALAS® Orthocover met geleidende lijm vast aan de op maat gemaakte inlegzool. Gebruik een schone kwast voor het aanbrengen van de lijm, en volg de aanwijzingen over de droogtijd van de lijmfabrikant op voor een goede hechting van het materiaal.

## STAP 4:

Om een gecertificeerde, op maat gemaakte inlegzool te laten passen bij een gecertificeerde JALAS®-schoen, moet deze worden geregistreerd. Registreer de inlegzool op:

<https://www.ejendals.com/partner-tools/orthopedic-insoles-registration/>

Vervolgens worden het registratiebewijs en nadere instructies naar je e-mailadres gestuurd.

Voor productidentificatie moet de volgende informatie worden afgedrukt of met een label worden aangebracht op de onderzijde van de op maat gemaakte inlegzool, op de linker- en de rechter voet:

- Bedrijfsnaam
- Unieke identificatie (bijv. patiëntcode)
- Naam en website van de fabrikant van de op maat gemaakte inlegzool
- Productiedatum
- De JALAS®-registratiecode die via de mail is toegestuurd

Let op: per geproduceerd paar op maat gemaakte inlegzolen kan er per patiënt slechts één unieke JALAS®-registratiecode worden gebruikt!

**KLAAR – Bedankt voor het kiezen van de JALAS®-oplossing voor op maat gemaakte inlegzolen!**

Ga voor andere talen naar [www.ejendals.com](http://www.ejendals.com)

